


CHANGEMENT DE VERSION			
Version	Date	Motifs	Auteur
01	05/11/2020	Création	Mélanie L.

Illustrations de l'ECG mis à disposition au sein du local infirmerie de Cherbourg :


*(Manuel d'utilisation à disposition sur le chariot de l'ECG)*

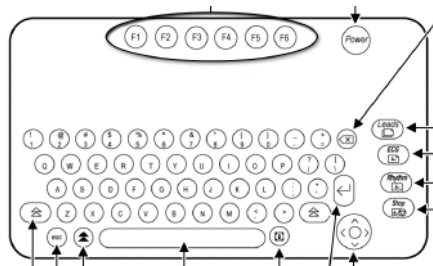

## Pour réaliser un ECG :

1. Allumer l'ECG
2. Sélectionner « info patient » en appuyant sur F1
3. Entrer l'identité du patient en utilisant le pavé fléché pour sélectionner les champs et en validant sur la touche du milieu de ce pavé (ou « entrée ») :
  - ▶ Nom,
  - ▶ Prénom,
  - ▶ Nom de l'entreprise (ID patient),
  - ▶ Date de naissance,
    - Maj pour Entrer le jour, « entrée »
    - Sélectionner le mois dans la liste déroulante à l'aide des flèches, « entrée »
    - Maj pour entrer l'année, « entrée »
  - ▶ Sexe
    - Sélectionner F ou M dans la liste déroulante à l'aide des flèches, « entrée »
  - ▶ Taille,
  - ▶ Poids,
  - ▶ Nom de l'IDEST.
4. Réaliser l'examen
  - ▶ Positionner les 12 électrodes : (Cf. p.53 du manuel d'utilisation)

5. Attendre que le voyant vert s'allume, en haut à droite,

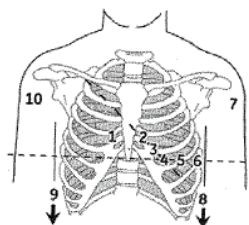


	Étiquette AHA	Étiquette IEC	Description
1	V1 rouge	C1 rouge	Quatrième espace intercostal sur le bord droit du sternum
2	V2 jaune	C2 jaune	Quatrième espace intercostal sur le bord gauche du sternum
3	V3 vert	C3 vert	À mi-chemin entre 2 et 4
4	V4 bleu	C4 marron	Cinquième espace intercostal, sur la ligne médio-claviculaire
5	V5 orange	C5 noir	Ligne axillaire antérieure à la même hauteur que 4
6	V6 violet	C6 violet	Ligne axillaire moyenne à la même hauteur que 4 et 5
7	LA noir	L jaune	Deltoïde gauche
8	LL rouge	F vert	Au-dessus de la cheville gauche (autre positionnement, sur la cuisse le plus près possible du buste)
9	RL vert	N noir	Au-dessus de la cheville droite (autre positionnement, sur la cuisse le plus près possible du buste)
10	RA blanc	R rouge	Deltoïde droit


6. Appuyer sur ECG pour imprimer le tracé,  
7. Appuyer sur « F1 » pour éditer une copie.

## Une fois l'ECG réalisé :

- Si le salarié prend un traitement susceptible de modifier le tracé le noter sur l'examen,
- Nettoyer avec une lingette désinfectante le module d'acquisition,
- Demander au médecin prescripteur de faire l'interprétation,
- Compléter la fiche de suivi dans le classeur situé dans l'infirmerie (EN060) :

	<b>FICHE DE SUIVI ECG</b>	MED/EN/060 – V1 Date d'application : 16/11/2020 Nombre de pages : 1/1
---	---------------------------	---

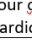NOM PRENOM	EMPLOYEUR	ECG Prescrit par	ECG Réalisé le	Envoyé le	Retour le	Remis pour  cardio

 Trame sous Intranet : DPS-Qualité puis « Trames documents »

- Si le médecin demande une interprétation par le cardiologue, laisser une copie de l'examen dans le dossier et envoyer l'original sous pli confidentiel à l'adresse suivante :

**Dr DEMATTEO**  
**25 Chemin des campagnes**  
**50270 BARNEVILLE CARTERET**

- Saisir l'examen sous PREVENTIEL,
- Au retour de l'examen (si envoi au cardiologue), mentionner la date de retour sur la fiche de suivi dans le classeur et montrer le compte-rendu du cardiologue au médecin prescripteur.